



**แอนติเจนบรูเซลโลซิส ชนิดทดสอบโรสเบงกอล  
(Brucella abortus Rose Bengal Plate  
Agglutination Antigen)**

แอนติเจนบรูเซลโลซิส ชนิดโรสเบงกอล

เป็นสารทดสอบโรสเบงกอลชนิดทดสอบบนแผ่นกระจกใสหรือแผ่นกระเบื้องเคลือบสีขาว

สรรพคุณ

ใช้ทดสอบโรคนิวเคลิโอซิส (โรคแท้งติดต่อ) ในโค กระบือและสุกร ที่เกิดจากเชื้อ

Brucella abortus

ส่วนประกอบ

ประกอบด้วยเชื้อ

Brucella abortus

สี

Rose Bengal

วิธีการใช้

1. ก่อนใช้น้ำซีรัมที่ต้องการตรวจ และแอนติเจนออกจากตู้เย็นเพื่อให้อุณหภูมิใกล้เคียงกับภายนอก

2. หยดซีรัม 0.03 มล.(1 หยด) ลงบนแผ่นกระจก

3. เขย่าแอนติเจนเบาๆ จนเข้ากัน แล้วหยด 0.03 มล.(1 หยด) ลงข้างๆ ซีรัม

4. ใช้แท่งแก้วหรือไม้จิ้มฟันคนเป็นรูปวงกลม ให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 ซม.

5. เอียงกระจกไปมา เพื่อให้ส่วนผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

6.ครบ 4 นาทีอ่านผลทันที

วิธีอ่านผล

Positive(+):

Negative(-):

7.แอนติเจนที่เปิดใช้แล้ว ให้เก็บรักษาในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส

ขนาดที่ใช้

ตัวอย่างละ 0.03 มล.

การเก็บรักษา

เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง

ขนาดบรรจุ

ขวดละ 10 มล. (300 ตัวอย่าง)